

Eläinlääkäri Dr. Bronin HK-hengityspumppu sopii vastasyntyneiden vasikoiden suusta ja nenästä tulevan liman poistamiseen ja vasikoiden elvyttämiseen erityisen vaikean poikimisen jälkeen.

1. Liman poistaminen vastasyntyneiden vasikoiden suusta ja nenästä.

Suuri määrä limaa suussa ja nenän alueella voi aiheuttaa merkittäviä ongelmia, kun vasikka alkaa hengittää ja voi johtaa jopa tukehtumiseen. Liman poisto käsin on tässä tapauksessa täysin riittämätöntä. HK-hengityspumppu on ratkaisu. Paina kumiosan aukko kiinni suun ja nenän ympärille kevyesti painaen ja ime limaa vetämällä kahvasta. Poista sitten HK-hengityspumppu ja aseta se sivuun. Paina kahvaa, jolloin HK-hengityspumpun sisällä olevan mäntä painuu alas ja imetty lima valuu ulos. Toista tämä prosessi oman harkintasi mukaan useita kertoja, kunnes suurin osa limasta on imetty pois.

2. Nopea elvytys erityisen vaikean poikimisen jälkeen.

Synnytysprosessi on suuri rasitus sekä emolle että vasikalle. Vaikeat poikimiset johtuvat mm. heikoista supistuksista, viallisista asennoista tai suuresta vasikasta. Vasikan rintakehään kohdistuvan paineen kestolla on ratkaiseva osa vastasyntyneen tulevaisuuden kannalta. Keuhkojen kehitys ja normaali hengityksen alku voi saada ratkaisevaa tukea HK-hengityspumpun avulla. Hengityksen tukemiseen tai elvytykseen vedä kahva siten myös mäntä mahdollisimman pitkälle ulos. Kumiholkin aukko asetetaan nenän ja suun päälle ja kahva painetaan hitaasti alas. Toista tämä prosessi omalla kohdallasi oman harkinnan mukaan.

Tärkeä huomautus: HK-hengityspumppu on puhdistettava huolellisesti ja desinfioitava, jokaisen käytön jälkeen. Säilytä puhtaassa, kuivassa paikassa.

Myönnämme (Valmistaja) takuun yleisten takuuehtojemme mukaisesti.



KOTIELÄINTARVIKE.FI
maatila-, ratsu- ja lemmikkitarvikeiden erikoisliike