

# Sanocyn<sup>forte</sup>

Hypokloorihapoke (HOCL)



Distributed by  
Veterinary  
Professionals



## Innovatiivista haavanhoitoa

HOCL Technology - Patentoitu valmistusprosessi

- akuuttien ja kroonisten haavojen huuhteluun
- puhdistaa, kosteuttaa ja huuhtelee ihon
- kaikenlaisten haavojen, puremien, hiertymien sekä ärtyneen ihon käsittelyyn



**Huuhde:**  
**Kaviot, haavat ja iho**

Pakkauskoko: 350 ml

Kestoaika: 24 kk

Pakkauksen koko: 20,5 x 7 cm

Paino: noin 400 g

Avatun pakkauksen kestoika: 3 kk

Ingredients: Aqua, Sodium Chloride, Active Chlorine Released from Hypochlorous Acid 300-650 ppm



**Huuhde:**  
**Haavat ja iho**

Pakkauskoko: 75 ml

Kestoaika: 24 kk

Pakkauksen koko: 13,5 x 4 cm

Paino: noin 100 g

Avatun pakkauksen kestoika: 3 kk

Ingredients: Aqua, Sodium Chloride, Active Chlorine Released from Hypochlorous Acid 300-650 ppm

## Kaviot, haavat ja iho: Huuhde

Sanocyn forte -hydrohuuhde on ykkösvalinta bakteerien ja sienten aiheuttamien kaviosairauksien hoitoon sekä haavojen, viiltohaavojen, ihoärsytysten, ihovaurioiden sekä hyönteisten ja punkkien puremien käsittelyyn.

Hoidettavat alueet puhdistetaan mekaanisesti huuhtelemalla runsaalla määrällä haavahuuhdetta. Huuhde poistaa bakteerit, sienet ja virukset, jolloin saavutetaan optimaaliset olosuhteet haavan paranemiselle.

Sanocyn forte -hydrohuuhdetta on saatavana kahtena pakkauskokona eri tarpeita varten.

## Annostelu haavaan tai iholle

1. Paljasta hoidettavat alueet
2. Sumuta reilusti Sanocyn forte -hydrohuuhdetta alueelle, jotta se huuhtoutuu hyvin
3. Anna huuhteen kuivua; aluetta ei tarvitse pyyhkiä
4. Toista käsittely useita kertoja päivässä

## Annostelu kavioon

1. Puhdista ensin hoidettava alue huolellisesti kaviokoukun avulla
2. Huuhtele kavio ja sädealue sumuttamalla reilusti Sanocyn forte -hydrohuuhdetta alueelle
3. Anna huuhteen kuivua; aluetta ei tarvitse pyyhkiä
4. Toista käsittely useita kertoja päivässä

## Muita annosteluun liittyviä suosituksia

Sanocyn forte -hydrohuuhde sopii hyvin käytettäväksi yhdessä haavasidoksen kanssa. Kastele sidos Sanocyn forte -hydrohuuhdeella ennen kuin asetat siteen haavan päälle.



## Sanocyn-valmisteiden yhteiskäyttö

Sanocyn forte -hydrohuuhde ja Sanocyn forte -hydrogeeli on suunniteltu toimimaan yhdessä haavanhoidossa. Runsa huuhtelu Sanocyn forte -hydrohuuhdeella puhdistaa käsiteltävät alueet tehokkaasti.

Sanocyn forte -hydrogeeli tarttuu hyvin, pitää haavan kosteana ja muodostaa suojaavan kalvon, mikä edesauttaa vaurion luonnollista paranemisprosessia. Parhaimmat tulokset saadaan näiden molempien tuotteiden yhdistelmällä.

## Kaviot, haavat ja iho: Hydrogeeli

Sanocyn forte -hydrogeeli tarttuu erinomaisesti, pitää haavan pinnan kosteana ja muodostaa suojaavan kalvon, joka voi auttaa estämään primaaristen ja sekundaaristen infektioiden syntyä. Tarttuvan koostumuksensa ansiosta tämä hydrogeeli on erityisen sopiva haavanhoitoon sekä vammojen, tulehdusten, ihoärtytysten ja hankalissa paikoissa sijaitsevien hyönteisten sekä punkin puremien käsittelyyn. Sanocyn forte -hydrogeeliä on saatavana kahtena pakkauskokona eri tarpeita varten.

### Annostelu haavaan tai iholle

1. Paljasta hoidettavat alueet
2. Levitä Sanocyn forte -hydrogeeliä
3. Anna geelin kuivua; aluetta ei tarvitse pyyhkiä
4. Toista annostelu useita kertoja päivässä

### Annostelu kavioon

1. Puhdista hoidettavat alueet huolellisesti kaviokoukulla
2. Sumuta reilusti hydrogeeliä kavioon ja säteeseen
3. Anna geelin kuivua, aluetta ei tarvitse pyyhkiä
4. Toista annostelu useita kertoja päivässä

### Muita annosteluun liittyviä suosituksia

Käyttö yhdessä Sanocyn forte -hydrohuuhteen kanssa: Huuhtele hoidettavat alueet reilulla määrällä Sanocyn forte -hydrohuhdetta ennen kuin annostelet hydrogeeliä pintaan.



- Suojaa haava-aluetta
- Tukee paranemisprosessia pidemmän aikaa
- Tarttuu hyvin myös hankalissa paikoissa sijaitseviin vauriokohtiin
- Pitää tuoreet haavat kosteina
- Leikkaushaavoihin
- Sopii kaikenlaisten haavojen puhdistamiseen
- Sopii ärtyneiden ihoalueiden ja hiertymien käsittelyyn



**Hydrogeeli:**  
Haavat ja iho

Pakkauskoko: 75 ml

Kesto aika: 24 kk

Pakkauksen koko: 13,5 x 4 cm

Paino: noin 105 g

Avatun pakkauksen kesto aika: 3 kk

Ingredients: Aqua, Sodium Chloride, LiMgNa-Silicate, **Active Chlorine Released from Hypochlorous Acid 300-650 ppm**



**Hydrogeeli:**  
Kaviot, haavat ja iho

Pakkauskoko: 350 ml

Kesto aika: 24 kk

Pakkauksen koko: 20,5 x 7 cm

Paino: noin 410 g

Avatun pakkauksen kesto aika: 3 kk

Ingredients: Aqua, Sodium Chloride, LiMgNa-Silicate, **Active Chlorine Released from Hypochlorous Acid 300-650 ppm**

## Sanocyn<sup>forte</sup> Huuhde

Huuhtelu ja puhdistus

Tukee paranemisprosessia

Päivittäinen haavanhoito

Poistaa likaa ja eritteitä

## Sanocyn<sup>forte</sup> Hydrogeeli

Haava-alueen suojaus

Pitää haava-alueen kosteana

Tarttuu myös hankalissa paikoissa sijaitseviin alueisiin

Estää primaarisia ja sekundaarisia infektoita


## HOCL:n etu

Kaikkien Sanocyn forte -tuotteiden ainutlaatuiset hoitavat ominaisuudet perustuvat hypokloorihapokkeeseen (HOCL), jota on myös elimistömme omassa puolustusjärjestelmässä. HOCL on tehokas eri patogeeneja vastaan. Sen sijaan rakenteeltaan järjestäytyneemmät solut (esim. ihmis- tai eläinkudokset) ovat kehittäneet suojaimekanismit, joiden ansiosta HOCL ei vaikuta niihin. Näin ollen Sanocyn forte tarjoaa tehokkaan haavanhoidon vahingoittamatta terveyttä kudosta.

- Vähentää taudinaiheuttajien kuormaa
- Kivuton käytössä
- Ei sisällä antibiootteja
- Alkoholiton
- Ihoystävällinen, ei ärsytä
- Neutraali pH-arvo
- Ei sisällä väriaineita tai hajusteita
- Turvallinen joutuessaan suuhun

## Tehokasta haavanpuhdistusta

Haava-alueet puhdistuvat, haavan paranemisprosessi saa optimaalisen tuen ja infektiot ennaltaehkäistään.

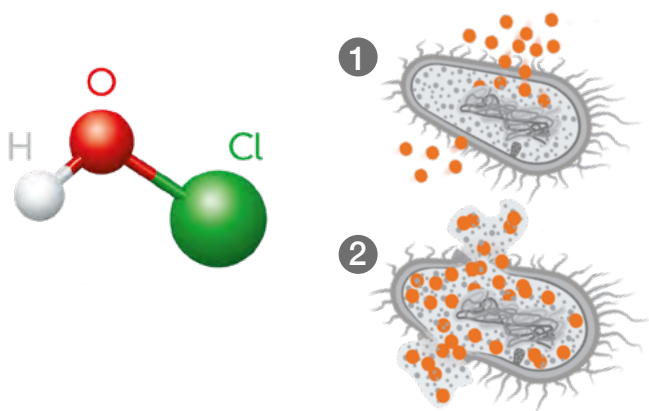

Kaikki Sanocyn forte -tuotteet noudattavat FEI:n ja FN:n (ADMR) anti-dopingsääntöjä ja ne sopivat loistavasti myös kilpaurheilun osallistuvien eläinten käsittelyyn.

Sanocyn forte -tuoteperhe valmistetaan ja pakataan Itävallassa ja Saksassa. Tämä mahdollistaa erinomaisen ja tasaisen laadun varmistamisen erästä toiseen.

**HUOM!** Lue aina käyttöohjeet ennen tuotteen käyttöä. Säilytä valmisteet huoneenlämmössä, suojassa suoralta auringonvalolta. Vain ulkoiseen käyttöön. Jos valmistetta joutuu silmään, huuhtelee runsaalla vedellä. Vain iholle. Hävitä tyhjät pakkaukset paikallisten jätteiden kierrätysohjeiden mukaan. Käytettävä 3 kuukauden kuluessa ensimmäisestä avaamisesta.

Ei tule käyttää yhdessä muiden haavojen puhdistamiseen tarkoitettujen valmisteiden tai hopeaa, jodia tai polyheksanidiä sisältävien liuosten kanssa.

## Hypokloorihapokkeen (HOCL) antimikrobinen teho<sup>1</sup>

	Prosentuaalinen väheneminen	Vaikutusaika sekunneissa
<i>E. coli</i>	>99,999	15
<i>P. aeruginosa</i>	>99,999	15
<i>S. aureus</i>	>99,999	15
<i>E. faecalis</i>	>99,999	30
<i>A. baumannii</i>	>99,999	15
<i>S. typhimurium</i>	>99,999	60
<i>E. hirae</i>	>99,999	60
<i>VRSA</i>	>99,999	15
<i>MRSA</i>	>99,999	15
<i>VRE</i>	>99,999	60
<i>C. albicans</i>	>99,99	15
<i>C. difficile</i>	>99,99	300

<sup>1</sup> C. Krueger, A. Hundeling, P. Engels. Low concentration mixture of HOCL/NaOCL - A safe and effective wound irrigation solution for sensitive tissues.

### 1 Soluseinän hajottaminen

Sanocyn forte ympäröi mikro-organismit ja valmisteeseen sisältämä HOCL hyökkää mikro-organismien soluseiniä kohti lisäten niiden läpäisevyyttä.

### 2 Osmolyysi – solu hajoaa

Hypotoninen liuos takaa, että soluun pääsee vuotamaan enemmän nestettä osmoottisen gradientin tasapainottamiseksi. Tämä johtaa täysin luonnolliseen, fysikaaliseen osmolyysiin (epäspesifinen osmoottinen sokki), jonka seurauksena solu hajoaa kasvaneen sisäisen paineen vuoksi.

